



Ланцет (скарифікатор) «ВОЛЕС»

Інструкція по використанню

UA.TR.099

Призначення

Використовується для забору капілярної крові та подальшого аналізу в лабораторії.

Опис виробу:

Скарифікатор з розмірами - 40x5,3x0,2 мм, матеріал - нержавіюча сталь, поверхня - гладка, без плям, без зачіпок. Упакований індивідуально. Метод стерилізації: радіація.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.


Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Обробіть місце забору крові спиртовою серветкою або антисептичним розчином.
4. Вийміть ланцет (скарифікатор) з індивідуальної упаковки.
5. Ланцетом (скарифікатором) проколите місце пункції.
6. За допомогою піпетки зберіть кров для подальшого аналізу.
7. По закінченню забору крові прикладіть до місця маніпуляції спиртову серветку або тампон з антисептичним розчином.
8. Після використання, утилізувати згідно встановлених вимог.

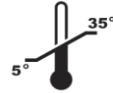

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Виробник:**

Huaian Tianda Medical Instruments Co.,Ltd

N106, East Songjiang Road, Huaiyin Economic, Technological Development Zone, 223002

Huaian City, Jiangsu, P.R. China

Гуаіан Тіанда Медігал Інструментс Ко.,Лтд

N106, East Songjiang Road, Гуаїїн Економік, Технологікал Девелопмент Зоне, 223002

Гуаіан Сіті, Джіангсу, Китайська Народна Республіка

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.



Дата останнього перегляду

02.11.2020

Директор ТОВ «ЛА МЕД»

Шульга О. Л.