



Пластир бактерицидний "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення: для захисту невеликих ран, коли накладення повноцінної пов'язки недоцільно, фіксації різних трубок, проводів, катетерів. Пластир закриває і захищає рану від попадання бруду, бактерій, не допускає повторного механічного пошкодження, стягує краї ран, що робить процес загоєння більш швидким і безболісним.

Опис виробу:

Пластир бактерицидний "ВОЛЕС" на бавовняній основі

Матеріал: бавовна

Структура: бавовна, поглинаюча подушечка та синтетичний каучуковий клей

Розмір: 7,2 x 1,9 см; 7,6 x 2,5 см

Пластир бактерицидний "ВОЛЕС" на еластичній основі

Матеріал: еластична основа

Структура: еластична основа, поглинаюча подушечка та синтетичний каучуковий клей

Розмір: 7,2 x 1,9 см; 7,6 x 2,5 см

Пластир бактерицидний "ВОЛЕС" на нетканій основі

Матеріал: неткана основа

Структура: неткана, поглинаюча подушечка та синтетичний каучуковий клей

Розмір: 7,2 x 1,9 см; 7,6 x 2,5 см

Пластир бактерицидний "ВОЛЕС" на ПВХ основі

Матеріал: ПВХ основа

Структура: ПВХ, поглинаюча подушечка та синтетичний каучуковий клей

Розмір: 7,2 x 1,9 см; 7,6 x 2,5 см

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.


Не використовувати не за призначенням

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Вийміть пластир з упаковки.



4. Відкрийте обгортку і зніміть захисну плівку з пластиру.
5. Рану продезінфікуйте та висушіть
6. Прикладіть пластрин поглинаючою подушечкою до рани.
7. Притисніть краї пластирної стрічки до шкіри.
8. Міняйте кожні 2-3 година або в разі забруднення.
9. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

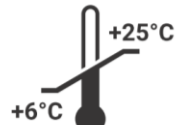

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.
Дата останнього перегляду – 11.10.2020 р



Виробник:

Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.

South of Yuegui Road 118, Huachuan Block, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Чжецзян Банглі Медікал Продактс Ко., Лтд

Соуз оф Юегуї Роад 118, Хуачуан Блок, Юнкан Сіті, Чжецзян Провінс, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.