



## Пробірка для забору капілярної крові з К3/К2 ЕДТА

### Інструкція по використанню

#### Призначення

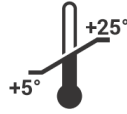
Пробірки з ЕДТА-К2 та ЕДТА-К3 використовуються для дослідження цільної крові у гематології. Пробірки з ЕДТА можуть використовуватися для рутинних імуногематологічних досліджень (тобто групування еритроцитів), визначення резус-приналежності та серологічного тестування, дослідження маркерів вірусів у скринінгових лабораторіях. Внутрішня сторона стінки пробірки вкрита ЕДТА-К2 або ЕДТА-К3. ЕДТА зв'язує іони кальцію, тим самим блокуючи систему згортання крові. Клінічний аналіз крові слід проводити упродовж 3 годин після забору крові. Пробірка забезпечує можливість забору крові за принципом «самотоку» з місця проколу. Верхній край пробірки виготовлений у вигляді лопатки для полегшення забору крові. Кришка без клапана.

| Найменування                                   | Наповнювач | Об'єм   | Капіляр      | Колір кришки | Відмітки на пробірці | Пакування                                                                |
|------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пробірка для забору капілярної крові з К2 ЕДТА | К2 ЕДТА    | 0,2 мл  | без капіляру | фіолетовий   | 0,2 мл               | Індивідуальна упаковка; упаковка 100 шт.; транспортна коробка – 2000 шт. |
|                                                |            | 0,25 мл |              |              | 0,25 мл              |                                                                          |
|                                                |            | 0,5 мл  |              |              | 0,25 мл<br>0,5 мл    |                                                                          |
| Пробірка для забору капілярної крові з К3 ЕДТА | К3 ЕДТА    | 0,2 мл  | без капіляру | фіолетовий   | 0,2 мл               | Індивідуальна упаковка; упаковка 100 шт.; транспортна коробка – 2000 шт. |
|                                                |            | 0,25 мл |              |              | 0,25 мл              |                                                                          |
|                                                |            | 0,5 мл  |              |              | 0,25 мл<br>0,5 мл    |                                                                          |

#### Спосіб використання:

1. Виберіть необхідний об'єм пробірки в залежності від завдань дослідження.
2. Підготуйте допоміжні засоби для взяття крові (одноразовий стерильний ланцет, систему взяття капілярної крові, дезінфікуючий засіб, ватний тампон).
3. Обробіть місце уколу, дайте висохнути (залишки дезінфікуючого засобу можуть викликати гемоліз).
4. Проведіть пункцію за допомогою стерильного ланцета.
5. Першу краплю крові витріть.
6. Обережно масажуючи долоню, палець, або п'яту, зберіть краплі крові в пробірку.
7. Коли пробірка буде заповнена, поверніть її вертикально, щоб кров стекла на дно.
8. Закрийте контейнер.

9. Обережно переверніть пробірку 8-10 разів, негайно, після забору крові, щоб отримати вірну суміш добавки та крові. Переверніть наповнену пробірку, а потім верніть її у вертикальне положення.
10. Не струшуйте!
11. На заповнений контейнер нанесіть маркування.
12. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

**Маркування на товарі:**

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**ВИРОБНИК:**

**HEBEI XINLE SCI&TECH CO., LTD**, No. 2, Xingye Street, Xinle city, 050700 Shijiazhuang City, Hebei Province, People's Republic of China

**ЖЕБЕЙ КСІНЛЕ САЙ&ТЕХ КО. ЛТД**, №2, дорога Ксінгує, місто Ксінле, 050700 Шицзячжуанський міський округ провінції Хебей, Китайська Народна Республіка

**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА В УКРАЇНІ:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД»

проспект Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корпус 1, м. Київ, 04210, Україна, код ЄДРПОУ 43652770,  
тел.: +38 044 300 05 04, e-mail: sale@lamed.com.ua

Директор  
ТОВ «ЛА МЕД»



Дата останнього перегляду  
22 квітня 2024 року

Шульга О.Л.