



UA.TR.099

Зонд для забору проб "ВОЛЕС" універсальний, одноразового використання стерильний

Інструкція по використанню

Призначення:

Зонд для забору проб універсальний застосовується:

1. В гінекології/урології: для забору матеріалу з уретри, піхви, шийки матки.
2. В офтальмології: при аналізі сльози.
3. Широко використовується для дослідження методом ПЛР
4. В генетиці - для взяття буккального зіскрібка.

Опис виробу:

Зонд універсальний виготовлений з поліпропілену. Складається з головки (робоча частина), виготовленої з віскози з напленням волокон мікроцелюлози і ручки. На ручці зонда є поперечна насічка яка дозволяє при необхідності відламувати кінець з робочою частиною і мазком для приміщення в контейнер, розташований в порожнистій ручці зонда, для транспортування в лабораторію. Контейнер використовується для зберігання і транспортування робочої частини зонда з біоматеріалом. Друга насічка дозволяє відламувати кінець з робочою частиною для приміщення безпосередньо в пробірку.

Довжина зонда (робоча частина + ручка): 175 ± 2 мм

Довжина робочої частини (з волокнистим покриттям): 22 ± 2 мм.

Діаметр робочої частини (з волокнистим покриттям): 3 мм

Перший злам на відстані 50 мм - для транспортування в мікропробірці тип Еппендорф 1,5-2 мл;

Другий злам на відстані 82 мм - для транспортування в пробірці звичайного типу

Виріб стерильний, апірогенний, нетоксичний. Кожен зонд упакований індивідуально.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Тільки для одноразового використання.

Повторна стерилізація – недопустима.

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Розкрийте упаковку, в зазначеному місці, дістаньте виріб.

4. Використайте за призначенням.
5. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China

ДЖІАНГСУ ЯДА ТЕЧНОЛОГІ ГРОУП КО.,ЛТД
Ксінкiao Рoad, Тоукiao Тоун, Гуанглінг Дістрікт, Янгжоу, 225109 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»,
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.
Тел.: (044) 581-11-38.
e-mail: sale@voles.com.ua, сайт: voles.com.ua

Дата останнього перегляду
02.02.2021

Директор
ТОВ «ТД «Віктер Плюс»



Лозінська О. М.