



UA.TR.099

Голка для спінальної анестезії «ВОЛЕС»

Інструкція по використанню

Призначення:

Спінальна голка може застосовуватися для Сма, діагностичної, терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин та інших цілей.

Тонкостінна голка з високоякісної медичної сталі забезпечує швидке отримання ліквору, що особливо важливо для голок малого діаметра.

Конфігурація прозорого рифленого павільйону дозволяє надійно утримувати голку під час процедури та забезпечує швидке визначення зворотного струму ліквору.

Повна відповідність зрізів голки і стилета зменшує травму тканин (зниження ризику епідермоїдної пухлини).

Тип вістря: Quincke (квінке)

Розмір: 20G, 22G, 23G, 25G

Розмір	Кольорове кодування	Діаметр, мм	Довжина, мм
20 G	жовтий	0,9	88
22 G	сірий	0,7	88
23 G	синій	0,6	88
25 G	оранжевий	0,5	88

Застереження:

- застосування виробу допускається тільки кваліфікованим медичним працівником;
- не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена;
- обов'язково ознайомтесь з інструкцію перед використанням;
- виріб не підлягає повторній обробці і стерилізації;
- використайте одразу після відкриття упаковки;
- виріб нетоксичний, апірогенний, стерильний.

Застосування:

- Оберіть необхідний розмір голки для спінальної анестезії, перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
- Обробіть руки антисептиком та надягніть стерильні рукавички.

3. Обробіть місце пункції спиртовою серветкою або антисептичним розчином.
4. Зробіть місцеву анестезію шкіри і прилеглих тканин.
5. Вийміть голку з упаковки.
6. Введіть голку для спінальної анестезії в спінальний простір.
7. Вийміть obturator з спінальної голки і почекайте поки не з'явиться спінальна рідина в прозорому павільйоні голки.
8. Введіть анестетик.
9. Обережно вилучіть спінальну голку.
10. Закрийте місце пункції стерильним матеріалом.
11. Утилізуйте голку відповідно до встановлених правил.



**FREE PYROGEN
NON TOXIC**



STERILE EO



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:

SHREE UMIYA SURGICAL PVT. LTD.
4704, G.I.D.C., PHASE – IV, VATVA, AHMEDABAD – 382445, GUJARAT, INDIA.
ШРЕЕ УМІЯ СУРГІКАЛ ПВТ. ЛТД.,
4704, Г.І.Д.С., ПХАСЕ – IV, Ватва, Ахмедабад – 382445, Гуджарат, Індія

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ТЕРМОМЕД»,
04219, м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду
01.04.2025р.

Директор
ТОВ «ТЕРМОМЕД»



Гусечко А.В.