



Голка двостороння «ВОЛЕС» для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна

Інструкція по використанню

Призначення

Голка двостороння призначена для використання під час забору венозної крові вакуумною пробірною, безпосередньо у пробірку, яка містить добавки у визначеному співвідношенні.

Опис виробу:

Двосторонні стерильні голки призначені для забору декількох проб за одну процедуру венепункції. Одна частина голки вводиться у вену пацієнту, а інша закрита гумовим клапаном. Футляр голки має етикетку з перфорацією, що є візуальним контролем цілісності упаковки.

Матеріал голки: нержавіюча сталь

Всі голки мають кольорове кодування згідно з ISO 6710.

Всі голки стерильні етиленоксидом згідно ISO 11135.

Опис	діаметр, мм	довжина, см	Колір	Розмір
Голка 20G	0,9	38	жовта	20Gx1 1/2
Голка 20G	0,9	25	жовта	20G*1 1"
Голка 21G	0,8	38	зелена	21Gx1 1/2
Голка 21G	0,8	25	зелена	21G*1 1"
Голка 22G	0,7	38	чорна	22Gx1 1/2
Голка 22G	0,7	25	чорна	22G*1 1"

Виріб стерильний. Кількість голок в первинній упаковці складає 100 шт.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.


Не використовувати не за призначенням.

Тільки для одноразового використання.

Повторна стерилізація – недопустима.

Спосіб використання:

1. Надіти рукавички.
2. Відкрийте голку двосторонню «ВОЛЕС» по лінії перфорації.
3. З'єднайте двосторонню голку з тримачем (система луер лок).
4. Проведіть пункцію вени.
5. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

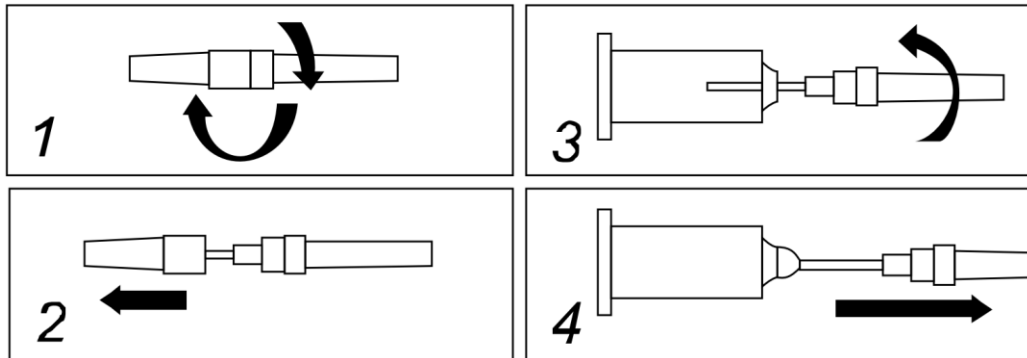

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Дата останнього перегляду: 07 травня 2021 року



Виробник: BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

No.14 Xingji Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China

Берпу Медікал Технолоджі Со., Лтд.,

№ 14 Хінджі Роуд Йонгхінг Стритс Лонгван Дістрікт, 325000 Венчжоу, Чжецзян Провінс, Китайська Народна Республіка

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор
Шульга О.Л.

