



Катетер аспіраційний з вакуумним контролем «ВОЛЕС»

Інструкція по використанню

Призначення

Катетер аспіраційний з вакуумним контролем – використовується в реаніматології й анестезіології для відсмоктування секрету з бронхів, трахеї й ротової порожнини, санації просвітів ендотрахеальних і трахеостомічних трубок.

Опис виробу:

Виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду. Має адаптер зі скошеним отвором для регулювання внутрішнього тиску на проксимальному кінці. Відкритий, заокруглений дистальний кінець та 2 бокових дренажних отвори на дистальному кінці. Конектор типу «Кар cone» («Кап кон»).

Кольорове кодування

Розмір, СН	Внут. d, мм	Зовн. d, мм	Довжина, мм	Розмірний ряд по кольору конектора
6	1,1	2,0	450±2	Зелений
8	1,7	2,7	450±2	Синій
10	2,3	3,3	450±2	Чорний
12	2,8	4,0	450±2	Білий
14	3,3	4,7	450±2	Зелений
16	3,8	5,3	450±2	Помаранчевий
18	4,5	6,0	450±2	Червоний

Виріб стерильний, апірогенний, нетоксичний. Кожен катетер упакований індивідуально.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

**Запобіжні заходи:**

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

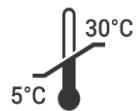
Не використовувати не за призначенням.

Тільки для одноразового використання.

Повторна стерилізація – недопустима.

Спосіб використання:

1. Перевірити цілісність індивідуальної упаковки;
2. Одягніть рукавички;
3. Підключіть катетер до аспіраційної трубки електровідсмоктувача для санації верхніх дихальних шляхів;
4. Зволожите катетер;
5. Введіть катетер у ротову порожнину не торкаючись задньої стінки глотки;
6. Проведіть переривчасту аспірацію впродовж 5 – 15 с залежно від віку пацієнта;
7. Повторюйте санацію до повного видалення мокротиння;
8. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корп. 1

Виробник: Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd

ADD: No.309 Xigu Road, Xiangshan County, 315700 Ningbo City, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Дата останнього перегляду
02.11.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.