



UA.TR.039

Голка для спінальної анестезії «ВОЛЕС»

Інструкція по використанню

Призначення:

- для пункції спінального простору з метою діагностики, лікування та спінальної (субарахноїдальної) анестезії.

Застереження:

- застосування виробу допускається тільки кваліфікованим медичним працівником;
- не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена;
- обов'язково ознайомтесь з інструкцією перед використанням;
- виріб не підлягає повторній обробці і стерилізації;
- використайте одразу після відкриття упаковки;
- виріб нетоксичний, апірогенний, стерильний.

Застосування:

1. Оберіть необхідний розмір голки для спінальної анестезії, перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть стерильні рукавички.
3. Обробіть місце пункції спиртовою серветкою або антисептичним розчином.
4. Зробіть місцеву анестезію шкіри і прилеглих тканин.
5. Вийміть голку з упаковки.
6. Введіть голку для спінальної анестезії в спінальний простір.
7. Вийміть obturator з спінальної голки і почекайте поки не з'явиться спінальна рідина в прозорому павільйоні голки.
8. Введіть анестетик.
9. Обережно вилучіть спінальну голку.
10. Закрийте місце пункції стерильним матеріалом.
11. Утилізуйте голку відповідно до встановлених правил.

**FREE PYROGEN
NON TOXIC****STERILE EO**

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:

SHREE UMIYA SURGICAL PVT. LTD.

4704, G.I.D.C., PHASE – IV, VATVA, AHMEDABAD – 382445, GUJARAT, INDIA.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.



Дата останнього перегляду
02.12.2020

Директор ТОВ «ЛА МЕД»

Шульга О. Л.