



UA.TR.039

Трубка ендотрахеальна «ВОЛЕС» (з манжетою, без манжети)

Інструкція по використанню

Призначення

Трубка ендотрахеальна – призначені для інтубації трахеї з метою проведення ШВЛ, при тривалій оральної або назальної інтубації, подачі киснево-повітряної суміші або інгаляційного анестетика.

Опис виробу:

Трубки виготовлені з прозорого, нетоксичного термопластичного полівінілхлориду. Дистальний кінець ендотрахеальної трубки і віконцем Мерфі ретельно оброблені і закруглені. Трубки можуть бути з манжетою і без манжети, та мають рентгено-контрастну смугу (РКП).

Манжета трубки циліндричної форми великого обсягу і низького тиску. Контролюючий балон зі зворотним клапаном забезпечує зорову і ручну перевірку тиску в манжеті.

Кольорове кодування

Тип	Внут. d, мм	Зовн. d, мм	Довжина, мм	Розмірний ряд по кольору конектора
Без манжети	2,0	2,9	145	чорний
Без манжети	2,5	3,5	150	жовтий
Без манжети	3,0	4,2	165	зелений
Без манжети	3,5	4,9	185	білий
Без манжети	4,0	5,5	210	синій
Без манжети	4,5	6,2	225	червоний
3 манжетою	6,0	8,2	285	чорний
3 манжетою	6,5	8,7	295	жовтий
3 манжетою	7,0	9,3	310	блакитний
3 манжетою	7,5	10,0	315	білий
3 манжетою	8,0	10,7	315	синій
3 манжетою	8,5	11,3	330	червоний
3 манжетою	9,0	12,0	330	білий
3 манжетою	9,5	12,7	330	помаранчевий

Виріб стерильний, апірогенний, нетоксичний. Кожен катетер упакований індивідуально.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

**Підготовка до використання:**

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

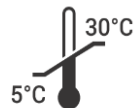
Не використовувати не за призначенням.

Тільки для одноразового використання.

Повторна стерилізація – недопустима.

Спосіб використання:

1. Перевірити цілісність індивідуальної упаковки;
2. Одягніть рукавички;
3. Перевірте надійність фіксації конектора з трубкою;
4. Ендотрахеальну трубку введіть в трахею за допомогою ларингоскопу або фібробронхоскопу;
 - А) Без манжети
 - 5.а. Закріпіть ендотрахеальну трубку в потрібному положенні;
 - 6.а. Після завершення інтубації видаліть трубку;
 - 7.а. Відрегулюйте параметри ШВЛ;
 - Б) З манжетою
 - 5.б. Через пілотний балон роздуйте манжету повітрям за допомогою шприца;
 - 6.б. Зафіксуйте ендотрахеальну трубку в потрібному положенні;
 - 7.б. Після завершення інтубації через пілотний балон видаліть повітря з манжети за допомогою шприца;
8. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корп. 1

Виробник: Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd

ADD: No.309 Xigu Road, Xiangshan County, 315700 Ningbo City, Zhejiang Province, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Дата останнього перегляду
02.11.2020

Шульга О. Л.