



Пробірка вакуумна для збору крові "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення

Пробірки використовуються для забору, транспортування та обробки крові для подальшого аналізу сироватки, плазми та крові в цілому в клінічній лабораторії.

Опис виробу:

Пробірка для забору крові вироблена з ПЕТ (поліетилентерефталат), кришечка вироблена з ПЕ (поліетилену). Вакуумна пробірка одноразового використання та виробляється в стерильних умовах. Пробірки оснащені кришечками з кольоровим кодуванням.

Кров відбирається вакуумом у пробірку, забраний об'єм визначається ступенем вакууму, який стандартизований для кожного діапазону пробірок.

Для забору декількох проб, використовуються різні пробірки (ЕДТА, активатор згортання тощо) та двостороння голка.

Внутрішня сторона пробірки стерильна. Пакуються в упаковки по 100 шт. Пробірки мають штрих-код для ідентифікації пацієнта.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати не за призначенням.

Використання:

1. Виберіть пробірку або пробірки, підхожі для відповідних зразків.
2. Зніміть ковпачок, щоб відкрити голку з клапаном.
3. Вкрутіть голку у тримач.
4. Накладіть джгут (максимум на 1 хвилину).
5. Підготуйте місце венепункції, продезінфікувавши антисептиком.
6. Зніміть захисний ковпачок з голки. Здійсніть венепункцію.
7. Зніміть джгут як тільки кров почне поступати у пробірку.
8. Коли пробірка наповнена й струм крові припинився, обережно вийміть голку з тримача таз вени, натиснувши на місце проколу сухим стерильним тампоном до припинення кровотечі.
9. Обережно переверніть пробірки після забору крові, щоб отримати суміш добавки та крові. Переверніть наповнену пробірку, а потім верніть її у вертикальне положення.
10. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.



Об'єм забору	Кольорове кодування	Тип пробірки	Опис	Змішування	Швидкість та час центрифугування
1 мл/1,8 мл/ 2,7 мл/3,6 мл/ 4 мл/4,5 мл	/блакитний/	цитрат натрію	Проба на коагуляцію	3-4	2000-2500 г (центробіжне прискорення) 10-15 хвилин
1 мл/2 мл/3 мл/4 мл/5 мл/6 мл/9 мл/10 мл	/червоний/	активатор згортання	Серологічна реакція	5-6	1300 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин
2 мл/3,5 мл/5 мл/8 мл	/жовтий/	активатор згортання + гель	Серологічна реакція	5-6	2000 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин
4 мл/6 мл/9 мл	/зелений/	літію гепарин, натрію гепарин	Аналіз плазми	8-10	1300 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин
3 мл/5 мл/8 мл	/зелений/	літію гепарин + гель	Аналіз плазми	8-10	1300-2000 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин
1 мл/2 мл/3 мл/4 мл/4,5 мл/6 мл/9 мл	/фіолетовий/	ЕДТА	Гематологічний аналіз	8-10	
3 мл/5 мл/8 мл	/фіолетовий/	ЕДТА + гель	Молекулярні діагностичні аналізи	8-10	1100-1500 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин
2 мл/4 мл	/сірий/	ФЕ/ флюорид натрію + ЕДТА	Аналіз визначення рівня глюкози	8-10	1300 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин

Маркування на товарі:



стерильно





Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**ВИРОБНИК:**

HEBEI XINLE SCI&TECH CO., LTD, No. 2, Xingye Street, Xinle city, 050700 Shijiazhuang City, Hebei Province, People's Republic of China

ЖЕБЕЙ КСІНЛЕ САЙ&ТЕХ КО. ЛТД, №2, дорога Ксінгує, місто Ксінле, 050700 Шицзячжуанський міський округ провінції Хебей, Китайська Народна Республіка

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА В УКРАЇНІ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД»

проспект Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корпус 1, м. Київ, 04210, Україна, код ЄДРПОУ 43652770,
тел.: +38 044 300 05 04, e-mail: sale@lamed.com.ua

Дата останнього перегляду
22 квітня 2024 року

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.