



Аплікатор "ВОЛЕС", стерильний

Інструкція по використанню

Призначення

Аплікатор призначений для взяття, зберігання і транспортування зразків біологічного матеріалу в медичні установи для проведення лабораторних досліджень; взяття санітарних змивів; засівання матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища та ін.

Опис виробу:

Аплікатор складається з двох основних елементів:

- ось тампона, при виготовленні якої використовується дерево, алюмінієвий дріт або пластик
- тампон, який виготовляють з віскози.

Кожен з перерахованих матеріалів володіє своїми характерними особливостями, виходячи з яких і проводиться вибір того чи іншого аплікатора при проведенні дослідження.

Кожен аплікатор індивідуально упакований, стерильний.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.


Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Виберіть аплікатор в залежності від завдань дослідження.
2. Розкрийте стерильну упаковку, витягніть аплікатор
3. В залежності від типу досліджування виконайте наступне:
 - а) для підготовки (очищення) місця взяття проби - зніміть з його допомогою надлишкове виділення;
 - б) для отримання матеріалу на цитологічне або бактеріологічне дослідження - візьміть мазок, нанесіть матеріал тонким шаром на предметне скло;
 - в) при засівання щільних поживних середовищ - відберіть на зонд культуру і нанесіть матеріал на щільне середовище штрихуванням;
 - г) для взяття біологічних проб для подальшого бактеріологічного дослідження - відберіть пробу і помістіть аплікатор в стерильну ємність порожню або з середовищем.

4. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

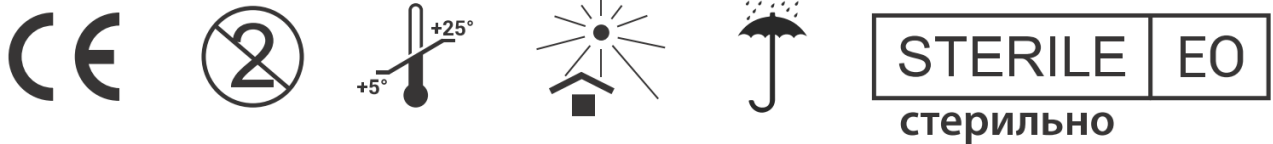

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД

Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Тел.: (044) 581-11-38.

e-mail: sale@voles.com.ua, сайт: voles.com.ua

Дата останнього перегляду
06.01.2020

Директор
ТОВ «ТД «Віктер Плюс»



Лозінська О. М.