



**Інструкція з використання
Мішки для збору та транспортування
медичних відходів**

УВАГА! Перед використанням виробу ознайомтесь з Інструкцією.

УВАГА! Використовуйте виріб лише за призначенням.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Мішок для збору та транспортування медичних відходів (далі – виріб) призначений для збору та транспортування особливо небезпечних медичних відходів в медичних закладах усіх профілів.

ОПИС: Виріб з поліетилєну, двошаровий дає можливість збирати та транспортувати відходи в об'ємах: 3 л, 10 л, 30 л, 35 л, 60 л, 120 л, 180 л, 240 л. Сприяє дотриманню гігієнічних норм в медичних установах та виключає ризик випадкового інфікування.

Об'єкти застосування:

Імунобіологічні лікарські засоби, з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність. Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та/або іншими біологічними рідинами, які не придатні до відновлення. Підгузки, засоби особистої гігієни (наприклад, жіночі прокладки), ЗІЗ пацієнтів/ відвідувачів, отриманих від пацієнтів/відвідувачів, хворих на такі інфекційні хвороби: віспа (натуральна віспа), віспа мавп (трох), гарячка Ласса, гарячка Марбург, вірусний гепатит А (лише забруднені випорожненнями (фекаліями)), грип людський пандемічний, дифтерія (лише забруднені виділеннями з уражених шкіри або слизових оболонок), поліомієліт (паралітичний) (лише забруднені випорожненнями (фекаліями)), сальмонельоз (лише забруднені випорожненнями (фекаліями)), туляремія; хвороба, викликана вірусом Ебола, холера (лише забруднені випорожненнями (фекаліями)), черевний тиф (лише забруднені випорожненнями (фекаліями)), чума, нові інфекційні хвороби. Відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій.



КОМПЛЕКТНІСТЬ:

1. Упаковка – 100 шт;
2. Ємність: 3 л, 10 л, 30 л, 35 л, 60 л, 120 л, 180 л, 240 л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: Поліетилен марки ПЕ низького тиску.

Товщина ПЕ: 20 мкм, 30 мкм, 40 мкм, 50 мкм.

Колір: червоний.

Термін експлуатації – 5 років.

Використання:

1. Дістаньте пакет потрібного вам класу з упаковки.
2. Розправте пакет та розкрийте його по горловині.
3. Руками надайте йому округлу форму.
4. Вставте його у пластикову тару.
5. Для фіксації пакету загніть його по краю тари.
6. Перевірте, чи прилягає дно пакету до тари.
7. Заповніть пакет на $\frac{3}{4}$ відходами обраного класу небезпеки. Слідкуйте за тим, щоб в пакет не потрапив гострий інструментарій.



8. Зберіть край пакету та видаліть з нього повітря.
9. Зафіксуйте горловину пакета.
10. Загерметизуйте пакет.
11. Заповніть інформаційне вікно на пакеті.
12. Пакет готовий до транспортування з місця утворення відходів на місце тимчасового зберігання відходів на території ЛПУ.

Зберігання:

Зберігати виріб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилується при температурі від -10 до +25°C та відносній вологості повітря 30 - 80% $\pm$ 10%, захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень. Гарантійний термін зберігання 5 років з дня виготовлення, за дотримання умов зберігання.

Утилізування:

Всі вироби потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.

Гарантії виробника:

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації виробів 5 років з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування і зберігання.

Виробник:

ТОВ «Бланідас», 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17, тел.: 0800 33 15 02, e-mail: help@lysoform.ua

