


Інструкція із застосування медичного виробу

Амніотом

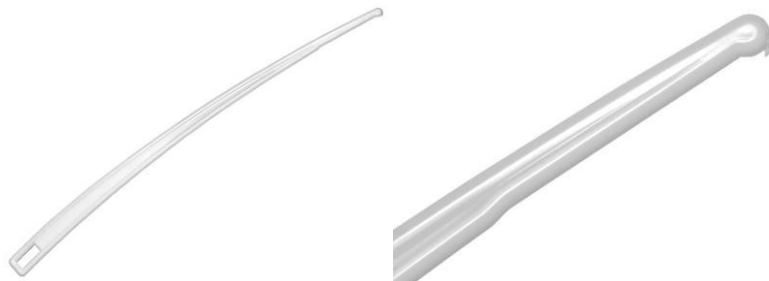

Вміст пакування: Амніотом стерильний, одноразового використання.

Призначення: для розкриття плодового міхура під час пологів, кесаревого розтину.

Область застосування: акушерство.

Характеристики: Амніотом являє собою стрижень у вигляді дуги. На заокругленому кінці амніотому (голівці) під кутом 60° знаходиться гострий гачок, який дозволяє розкрити оболонку плодового міхура, не травмуючи плід, не пошкоджуючи слизову шийки матки і ніжну шкіру плоду. Виготовлений з білого ABS-пластику. Довжина 250 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити амніотом з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Підвести амніотом до плодових оболонок заокругленим кінцем.
4. Розкрити плодовий міхур розташованим на голівці гачком.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати амніотом відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Tel.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua



UA.TR.099

