

Інструкція із застосування медичного виробу

Аплікатори



Вміст пакування: Аплікатор, бавовняна верхівка, дерев'яний стрижень стерильний, одноразового використання.

Призначення: для взяття біологічного матеріалу для подальшого лабораторного вивчення, а також для обробки ран розчинами та іншими видами лікарських засобів.

Область застосування: широкого спектру використання, у тому числі, застосовується в лабораторіях, урології, гінекології, отоларингології

тощо.

Характеристики: Аплікатор являє собою гігроскопічний бавовняний тампон, який виготовлено шляхом намотування волокна за спеціальною технологією, що надає йому краплеподібну форму, зафіксований на дерев'яному стрижні.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити аплікатор з упаковки.
3. Медичний виріб готовий до використання. Тримавши аплікатор за край стрижня без ватного намотування, провести необхідні маніпуляції.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
3. Використати одразу після відкриття упаковки.
4. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

