


Інструкція із застосування медичного виробу

Дзеркало гінекологічне

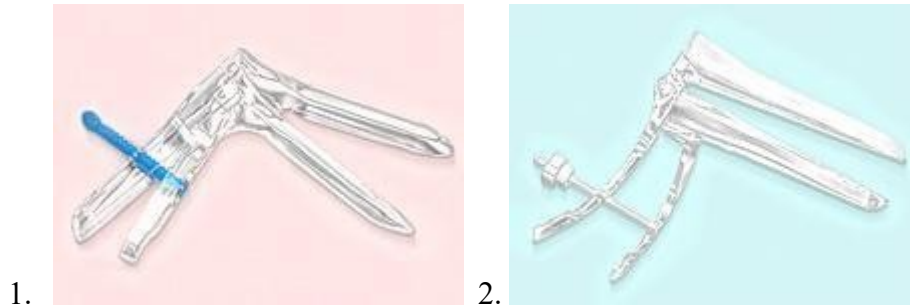

№ п/п	Розмір виробу
1	Дзеркало гінекологічне розмір S стерильне, одноразового використання
2	Дзеркало гінекологічне розмір М стерильне, одноразового використання
3	Дзеркало гінекологічне тип Б розмір S стерильне, одноразового використання
4	Дзеркало гінекологічне тип Б розмір М стерильне, одноразового використання
5	Дзеркало гінекологічне тип Б розмір L стерильне, одноразового використання

Призначення: призначене для огляду слизової піхви і шийки матки, забезпечення доступу при виконанні лікувально-діагностичних маніпуляцій в гінекології.

Характеристики: малюнок 1 - Дзеркало гінекологічне, поворотно-зубчаста фіксація (розмір S, М); малюнок 2 - Дзеркало гінекологічне тип Б, гвинтова фіксація (розмір S, М, L). Виготовлене з міцного, теплопровідного, нетравматичного, прозорого полістиролу (PS). Складається з 2-х стулок (верхня, нижня), робочого вікна (вікно візуалізації), фіксатора (типу поворотно-зубчастий або гвинтовий), 2-х рукояток. Краї стулок дзеркала заокруглені, добре відшліфовані - забезпечують легке, безболісне введення дзеркала.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити дзеркало з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Розташувати дзеркало із зімкнутими стулками біля входу до піхви.
4. У зімкнутому положенні стулок обережно ввести дзеркало в піхву.
5. Розвести стулки на необхідну відстань шляхом зведення рукояток.
6. Зафіксувати замок дзеркала, обернувши фіксатор на 90° (для дзеркала з поворотно-зубчастою фіксацією) або гвинтом (якщо фіксація гвинтова).
7. Провести огляд та необхідні маніпуляції.
8. Виведення дзеркала з піхви здійснюється в зворотному порядку (зімкнути стулки, потім видалити дзеркало).
9. Після проведення необхідних маніпуляцій та видалення дзеркала з піхви, утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.
Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай
Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

